


Bedienungsanleitung Vitalis®-IMPULSA-MED PRO

1. Gerät einschalten
2. Elektroden einstecken
3. Programm aus Handbuch auswählen
4. Level-Intensität einstellen und „Start“-Taste drücken

1. Anzeige im Display = Programm-Nr. laut Programm-Handbuch

2. Nach Start des Programms = Dauer der Behandlung in Minuten

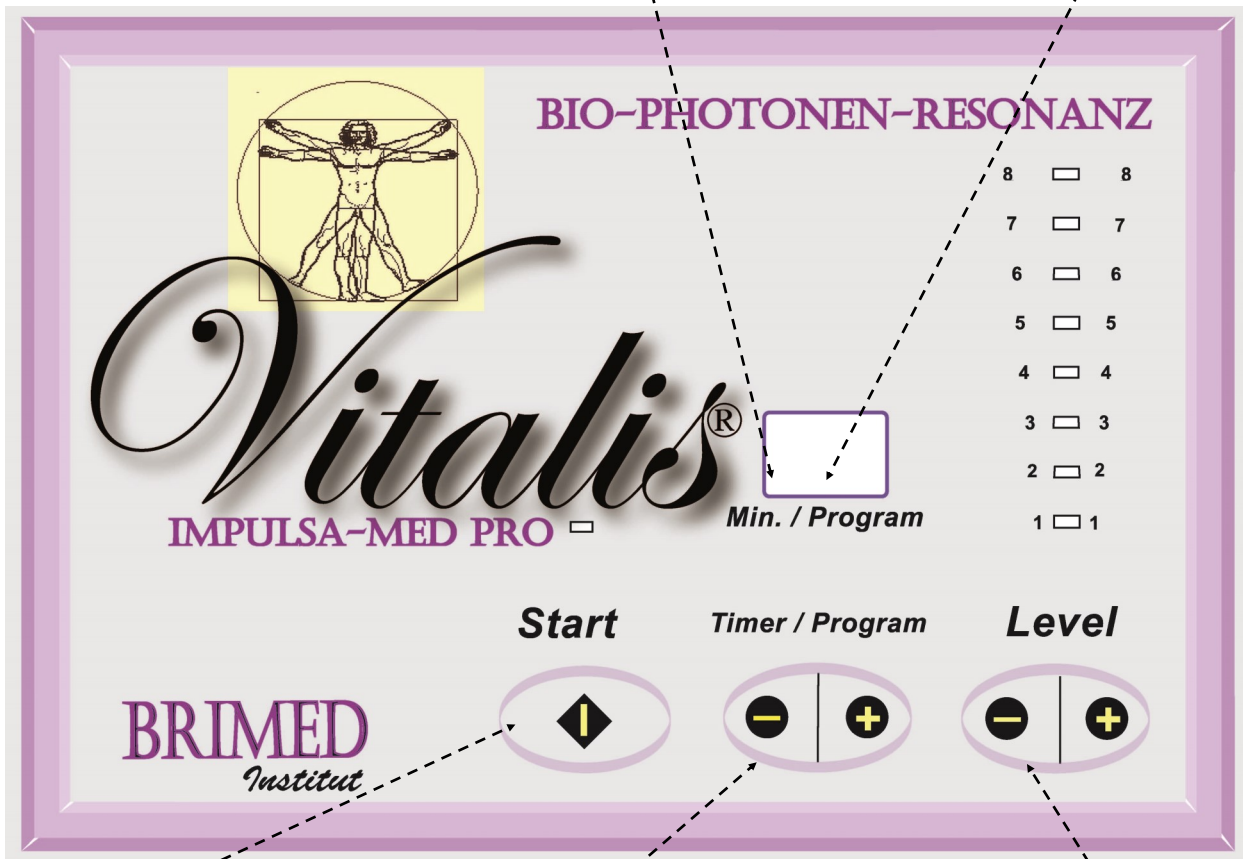

1. Funktion: Einschalten des Gerätes
2. Funktion: Start des Programms
3. Funktion: Programm stoppen

1. Funktion: (+) = Programme auswählen nach oben
2. Funktion: (-) = Programme auswählen nach unten

1. Funktion: (+) = Level-Intensität erhöhen
2. Funktion: (-) = Level-Intensität verringern



Vitalis®-Modulations-Applikator einstecken

Externe Zuschaltung zur Psycho-Phonetik (Optional)

Psycho-Phonetik:
1. (links) Kopfhörer
2. (rechts) Licht-Blitzbrille

Netzstecker